

NUEVO

AYUDA A
**ELIMINAR
LAS PICADURAS
DE MEDUSAS**
IT HELPS TO REMOVE
JELLYFISH BITES

✓ **RÁPIDO Y FÁCIL**

En sólo 2 pasos:

In only 2 steps:

1



Arrastrar los filamentos de medusa incrustados en la piel.

Remove the jellyfish filaments embedded in the skin.

2



Lavar con agua de mar.

Wash the bite with seawater.

100%
biodegradable

MEDUCLEAN®


medusas jellyfish



- ES** Espátula con mango ergonómico y cabezal recogedor que ayuda a eliminar, sin extender, los filamentos de medusa de una forma fácil y cómoda.

MODO DE EMPLEO / HOW TO USE:

1

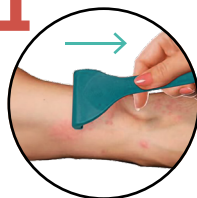

- ES** Colocar la espátula horizontalmente con el recogedor hacia abajo tocando la piel y arrastrar los filamentos de medusa incrustados en el sentido que indica la flecha.

2



- ES** Lavar la picadura con abundante agua de mar.

ES RESULTADOS

Después de la eliminación de los filamentos de medusa con la espátula, la zona afectada mejora paulatinamente (entre 1 y 4 horas).

* Test realizado bajo control dermatológico.



- ES** Evitar bañarse en aguas infestadas de medusas.
No utilizar agua dulce para limpiar la picadura.
En caso grave, no sustituye tratamiento posterior.



CONTIENE RECOGEDOR
para evitar que los filamentos se extiendan.
Suave con la piel.

MANGO ERGONÓMICO.
Cómodo y fácil de manejar.



www.meduclean.com